

로프릭 - 유아

LoFric® 로프릭은 친수성 코팅이 적용된 일회용 도뇨 카테터입니다.

요도에 삽입하여 간헐적인 소변배출을 위해 사용하는 장·단기 방광 관리용 제품입니다.

LoFric 카테터는 의사의 처방을 받아 사용할 수 있습니다.


사용하기 전에 의료 전문가가 제공한 도뇨 방법에 대한 조연과 교육을 따르세요.

이 제품은 '의료기기'이며, '사용상의 주의사항'과 '사용방법'을 잘 읽고 사용하세요.


사용에 불편함이 있을 경우, 처방 담당자에게 문의하세요.

사용방법

1. 먼저, 비누와 물로 손을 청결하게 세척한다.
2. 배출구 방향으로 포장을 조심히 벗겨 개봉한다.
3. 포장 안에 물을 채운다.
(가정에서는 찬 수도물, 병원에서는 무균수 또는 식염수 사용)
배뇨를 위해 카테터를 삽입하기 전 30 초 이상 물에 카테터를 담가 두어 준비한다.
4. 포장 뒷면에는 접착이 가능한 접착면이 있다. 파란색 탭을 제거하고 세면대 및 근처의 건조한 면이 있는 곳에 포장을 부착한다.
5. 포장에서 카테터를 꺼낸다.
6. 음경을 배 쪽으로 들어 올립니다. 이 자세에서는 요도가 확장되어 U자 모양이 됩니다. 이렇게 하면 카테터를 방광으로 더 쉽게 삽입할 수 있습니다.
7. 카테터를 요도에 천천히 삽입합니다. 소변이 흐르기 시작하면 카테터를 약간 더 밀어 넣어 소변흡입구가 방광 안으로 모두 들어가게 합니다.
8. 음경과 카테터의 배출구 끝을 다른 용기에 향하게 합니다. 소변 흐름이 멈추면 천천히 카테터를 조금씩 빼냅니다. 소변이 다시 흐르기 시작하면 방광이 완전히 비워질 때까지 기다립니다.
9. 음경을 다시 배 쪽으로 들어 올려 카테터를 천천히 빼냅니다.
10. 카테터를 포장에 다시 넣어 폐기하십시오.

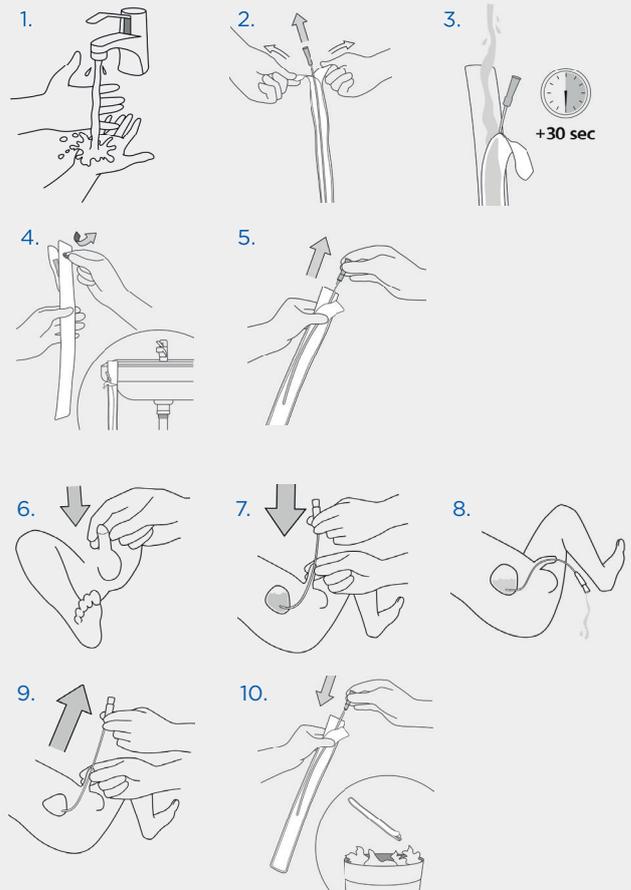

1. 음순을 벌려 질 개방부 바로 위에 있는 요도를 찾습니다.
2. 다른 쪽 손으로 카테터를 요도에 천천히 삽입합니다.
소변이 나오기 시작할 때까지 카테터를 넣어 주고, 소변이 나오기 시작하면 소변흡입구가 방광 안으로 모두 들어갈 수 있도록 약간 더 밀어 넣습니다.
이제 음순을 벌린 손을 놓아도 됩니다.
3. 음경과 카테터의 배출구 끝을 다른 용기에 향하게 합니다. 소변 흐름이 멈추면 천천히 카테터를 조금씩 빼냅니다. 소변이 다시 흐르기 시작하면 방광이 완전히 비워질 때까지 기다립니다.
4. 카테터를 천천히 빼냅니다.
5. 카테터를 포장에 다시 넣어 폐기하십시오.

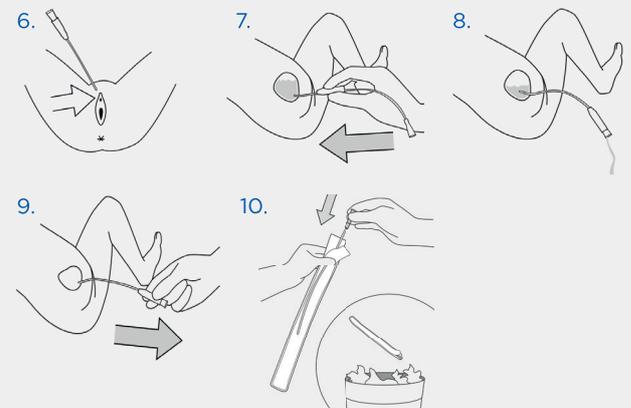

Wellspect 웰스펙트는 방광과 장에 고민이 있는 사람들의 삶의 질을 향상시키는 혁신적인 실금관리 솔루션을 개발합니다. 우리는 건강과 웰빙뿐만 아니라 스스로 자신감과 독립성을 쌓을 수 있게 우리의 사용자들을 응원합니다. 당사는 LoFric® 로프릭 및 Navina™ 나비나 제품 브랜드로 40년 이상 업계를 선도해 왔습니다. 우리는 항상 제품의 환경적 악영향을 최소화하고, 기후 중립을 위해 열정적으로 노력하고 있습니다. 우리는 현재와 미래를 위해 지속 가능한 방법으로 임상 결과를 개선하기 위해 사용자 및 의료 전문가와 협력합니다.

Wellspect. A real difference.

제품과 서비스에 대한 자세한 내용은 [Wellspect.com](https://www.wellspect.com)을 참조하십시오.

LinkedIn, Twitter, Facebook 및 Instagram에서 대화에 참여하세요.

[wellspect.com](https://www.wellspect.com)

